

ずっとガード ベータテストのご案内

このたびは「ずっとガード」ベータテストへのご参加をご検討いただき、ありがとうございます。本書は、ベータテストの全体像を、設置の前にご家族でご確認いただくためのものです。

合同会社 Data Analysis Labo / サポート: support@d-a-labo.co.jp

1. ずっとガードとは

見守り対象のお部屋にiPhoneを常設し、転倒などの異常を検知するとご家族へメールでお知らせするアプリです。 - お部屋の映像は外部に送りません（解析はiPhoneの中で完結します） - お知らせに、状況確認のための静止画像を添えることもできます（オン/オフを選べます）

できること / できないこと（正直にお伝えします）

できること	できないこと
転倒などの異常をご家族へ速やかに通知	24時間の人による監視
お知らせが未確認なら再通知	駆けつけ・救助・119番の代行
見守りが止まったら通知	すべての転倒を必ず検知すること

ずっとガードは「ご家族が異常に気づくのを助ける補助ツール」です。緊急時は119番などを優先し、これまでの見守り（電話・訪問等）も続けてください。

★ご使用の機種について（重要）

お使いの機種がPro系以外（iPhone 12以降の標準モデル・iPhone XR・SE第2世代以降など、距離センサー〈LiDAR〉非搭載）の場合は、標準（2D）モードで動作します。このモードでは、カメラに対して横向きに倒れた場合は検知できませんが、正面・奥行き方向に倒れた場合は検知できないことがあります

（Pro系〈LiDAR搭載〉の機種は高精度な3Dモードで動作します）。この点をご理解のうえご参加ください（設置時に、転びやすい場所がカメラの左右に来るよう当社が調整します）。

2. ベータテストの概要

項目	内容
期間	4週間 （延長は相談のうえ）
費用	無償 。設置器具も当社が用意します
お礼	正式版リリース後 6ヶ月間の利用料無料 ＋終了時にお礼の品
設置	当社スタッフが訪問して設置・設定 します
お願いすること	週1回程度の簡単なヒアリング（10分ほど）／気づいた点のご連絡
途中でやめる	いつでも可能 です。不利益はありません

このベータの特別な目的

今回は製品だけでなく、説明の動画や資料が「分かりやすいか」も一緒に確かめさせていただきます。「まず資料を見て、ご自身でやってみる」→「詰まったら記録する」というご協力をお願いします。詰まった箇所こそ、私たちが改善すべき点です（別紙「わかりやすさ評価シート」をお使いください）。

3. ご用意いただくもの

- 見守り専用ができる **iPhone**（日常使いではなく常設用に。iPhone 12以降・XR・SE 第2世代以降が対象。Pro系は高精度3D・それ以外は2Dモード）
- Wi-Fi環境**
- 設置するお部屋（ベッド/ソファのある寝室など）
- お知らせを受け取る**ご家族のメールアドレス**

（設置器具・マグネット対応ケース・設定作業は当社が用意・実施します）

4. 当日～運用の流れ

1. **事前:** 本書と各資料をご一読（+iPhoneの空き容量・iOS更新のご準備）
 2. **設置当日:** 当社が訪問し、①参加同意書のご署名 ②アプリ設定 ③設置 ④動作確認（テストで一度床に横になり、通知が届くか一緒に確認）
 3. **運用中:** ふだんは操作不要。通知が来たら「クイックガイド」に沿って対応
 4. **週1回:** 簡単なヒアリング（安心感・誤報の有無・使い勝手・資料の分かりやすさ）
 5. **終了時:** アンケートにご協力ください
-

5. お渡しする資料（別紙）

- ・ 初期設定ガイド / よくあるご質問（FAQ）
 - ・ **通知が来たときのクイックガイド**（冷蔵庫などに貼ってください）
 - ・ 参加同意書 / プライバシーポリシー
 - ・ わかりやすさ評価シート（ご協力のお願い）
 - ・ 説明動画のご案内（製品紹介・設置・アプリ設定・通知対応）
-

6. プライバシーについて

- ・ お部屋の映像は**外部に送信されません**（iPhone内で解析）
 - ・ 外部に送るのは、お知らせ（検知内容・時刻）と端末の稼働状況のみ
 - ・ 確認画像は「送る」を選んだ場合のみ通知に添付され、ご家族が見た後に削除されます
 - ・ 詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
-

ご不明な点は、どうぞお気軽にサポートまでご連絡ください。 support@d-a-labo.co.jp

ベータのご案内 v1 / 2026-07-10 / 合同会社 Data Analysis Labo